

# Racegel

## Einfacher und schneller Zugang zu zervikalen Rändern

Racegel ist ein neues Gel, das speziell dafür entwickelt wurde, Ihre gingivalen Vorbereitungsmaßnahmen einfacher und für die Patienten angenehmer zu machen sowie gleichzeitig die Qualität und Präzision Ihrer Abformungen zu gewährleisten.

Racegel ist einfach aufzutragen, schnell zu entfernen und atraumatisch für das gingivale Gewebe.

Dank seines einzigartigen Thermo-Gelbildungseffekts öffnet Racegel den Sulkus ohne jegliche Druckausübung und hält die Gingiva passiv ab. Innerhalb von Minuten sind die zervikalen Präparationsränder ideal freigelegt für die Abformung.

Racegel kontrolliert die Blutung sowie gingivale Sekretbildung und schafft so ideale Bedingungen für die Abdrucknahme.

Racegel enthält Aluminiumchlorid (25 %), dessen adstringierende Eigenschaften klinisch bewährt sind, das eine sichere Verdrängung des Gewebes bewirkt und spezielle blutstillende Produkte überflüssig macht.

Racegel ist praktisch verpackt und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis.


Es muss kein spezielles Instrumentarium gekauft werden. Racegel wird in einer dünnen Spritze mit vorgebogenen Applikationsspitzen zur besseren Kontrolle beim Auftragen des Gels auch in schwer zugänglichen Regionen geliefert.



## Einziger Thermo-Gelbildungseffekt von Racegel

- Die Viskosität von Racegel steigt mit der Temperatur.
- Bei Raumtemperatur (20 °C) ist Racegel in der Spritze flüssig.
- In Kontakt mit Oralgewebe (35 °C) wird Racegel sofort zu einem Gel.
- Dieser Effekt ist reversibel und gewährleistet das einfache Abspülen mit Wasser.

## Entwicklung der Viskosität bei Temperatur

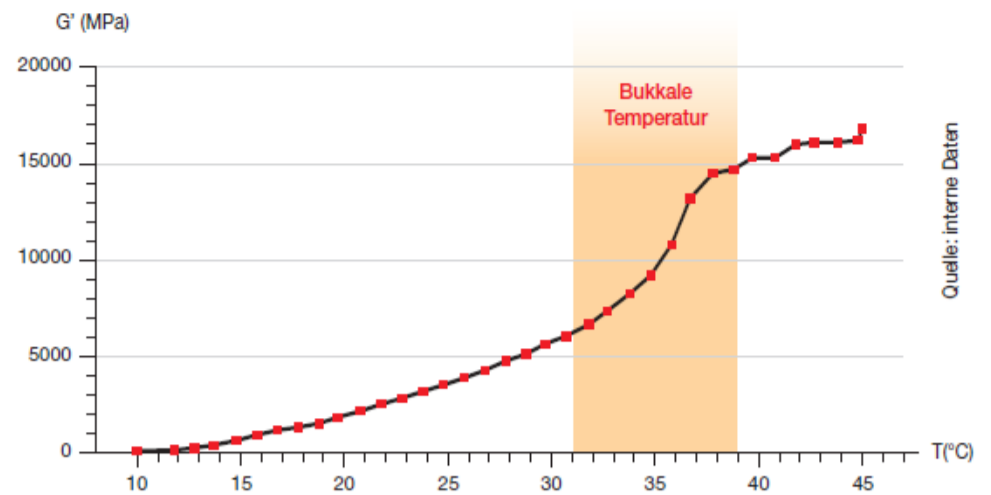

## Eigenschaften von Racegel

Eigenschaften	Vorteile
Reversible thermo-gelbildende Viskosität	Kein mechanisches Trauma der Gingiva, präzise Applikation und einfaches Abspülen. Festes Gel in der Mundhöhle (35 °C), das an Ort und Stelle bleibt und nicht wegläuft oder tropft.
25 % Aluminiumchlorid	Klinisch bewährte adstringierende Verbindung für eine optimale Kontrolle der Blutung und Sulkusöffnung.
Orangefarben	Bessere Sichtbarkeit von Racegel beim Auftragen und Abspülen.
Neue Spritzen mit vorgebogenen Applikationsspitzen	Bessere Kontrolle der Gelplatzierung selbst in schwer zugänglichen Regionen.
Retraktionsfaden unnötig ... ... aber möglich	Atraumatische Vorbereitung vor der Abdrucknahme ohne Verletzung des Parodontiums und ohne Schmerzen für den Patienten. Das Gel klebt nicht am Retraktionsfaden und lässt sich leicht abspülen.

## Klinischer Fall



Racegel um die Präparation in den Sulkus applizieren und 2 Min. wirken lassen.



Gründlich abspülen und die Abformung durchführen.



Alle Ränder und subgingivalen Details werden perfekt wiedergegeben.



Und sind auf dem Gipsmodell sichtbar.

Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Daniel Dot, Privatpraxis, Paris, Frankreich

## Produktinformationen



### Racegel

- 3 Spritzen mit je 1,4 g
- 20 vorgebogene Applikationsspitzen

