


Alveogyl

Trockene Alveole? Lindern Sie den Schmerz.

Alveogyl ist die ideale Einlage bei trockener Alveole (Alveolitis sicca). Es wirkt schnell gegen Schmerzen und ist einfach anzuwenden. Alveogyl kann auch als Wundverband nach Extraktionen verwendet werden.

Alveogyl wird nur einmal appliziert, muss nicht entfernt werden und erfordert keine Naht. Wenn es einmal liegt, genügt einfaches Abwarten und Beobachten. Es wirkt beruhigend auf das alveoläre Wundgewebe und trägt somit zur raschen Schmerzlinderung bei. Die faserige Konsistenz von Alveogyl, die es den Penghawar-Fasern verdankt, erlaubt ein einfaches Auffüllen der Alveole und gewährleistet eine gute Adhäsion an die Alveolenwand.

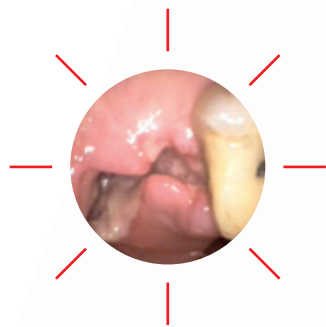

Eigenschaften von Alveogyl

Eigenschaft	Vorteil	Nutzen
enthält Penghawa-Fasern	faserige Konsistenz	erlaubt einfaches Auffüllen der Alveole und gewährleistet gute Adhäsion an der Alveolenwand während des gesamten Heilungsverlaufs
Einlage für trockene Alveole	beruhigende Wirkung auf das alveoläre Wundgewebe während der Heilung	trägt zur raschen Schmerzlinderung bei
keine Naht erforderlich	Abwarten und Beobachten genügt	praktisch und komfortabel anzuwenden
muss nicht entfernt werden	eine einzige Anwendung	keine weiteren Termine nötig

Indikationen

Alveogyl kann als Wundverband nach komplizierten oder traumatischen Extraktionen bei Patienten mit positiver Anamnese für Alveolitis sicca verwendet werden.

Anwendungshinweise

- eine kleine Portion (ca. 0,20 g) Alveogyl Paste entnehmen
- vorsichtig in die vorbereitete Alveole applizieren
- keine Naht legen

Produktinformation



Alveogyl

Dose à 10 g

Alveogyl erhalten Sie über Ihren Dentalhandelspartner.

UVP 29,30 €

